



EXPLICACIÓN
TÉCNICA

Zona ❶: Algodón + Lycra (elastómero de alta densidad): hacen que su gran resistencia ayuden a fortalecer tanto a la musculatura como las articulaciones del pie impidiendo la desviación del pulgar hacia los otros dedos.

Las líneas de elaboración ❷: Envuelven la región del metatarso e interaccionan con la zona ❶ amplificando el efecto sobre el pulgar y sobre la musculatura del pie.

Zona ❸: Algodón + Nylon elastificado suave con líneas de elaboración más o menos densas estudiadas para un correcto vendaje que favorece el retorno linfático.

Zona ❹: 100% Algodón, elaboración clásica, suave.

Advertencias e instrucciones de uso:

En los primeros tiempos, se aconseja un uso gradual a partir de 2/3 horas aproximadamente, hasta llevarlo todo el día. No existen contraindicaciones, aunque es posible que inicialmente se manifieste una dolencia de la musculatura del pie o de la pantorrilla. Se obtiene un efecto de masaje linfodrenante incluso en el pie sano. En caso de enrojecimiento o dolor persistente consulte a su médico o podólogo.

Composición

60% Algodón
33% Polyamida
7% Lycra



Imported by:



prodotto 100% italiano

Pol. Ind. Plà de la Bruguera • C/ Berguedà, 16-18
08211 Castellar del Valles (Barcelona)
tel. 93 747 34 30 • fax 93 747 20 40
e-mail: info@rocotex.com • www.rocotex.com



ROCOTEX S.L.

Español

alluce
Valgo[®]
solution



Un calzino per **Amico**

by Paolo Scettri

Autorizzazione Ministeriale n. 0001481/P del 16/01/2009




**EN FARMACIA •
PARAFARMACIA • ORTOPEDIA**

Es un dispositivo médico CE
Patente N° WO 2008/102405



I.S.P.E. snc - Via G. Galilei, 22
35030 Sarmeola di Rubano (PD) - ITALY
Uff. comm.: Tel./Fax +39 049 8075271
Amm.ne: Tel. +39 049 8976776
www.ispesolution.com



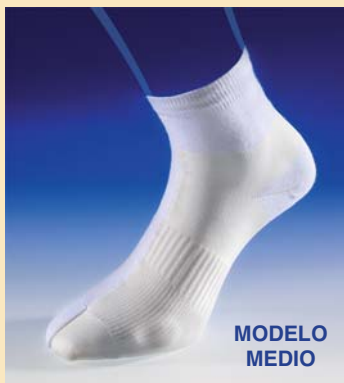

Alluce Valgo Solution®

Un Amigo
para el pie

Alluce Valgo Solution®

Es un calcetín tecnológicamente innovador ideado para envolver el pie y asistirlo en su función fisiológica.

- **Útil para quien sufre de juanete o tiene tendencia a desarrollarlo:** Su acción de fuerza contrarresta la desviación anómala del pulgar hacia los otros dedos.
- **Favorece** una mejor adaptabilidad del calzado debido a la disminución del roce del juanete con el zapato.
- **Actúa activamente:** El distinto entrelazado de fibras de varias clases, se mueve en sintonía con el pie masajeadolo, favoreciendo el retorno linfático y reafirmando la musculatura.
- **Ayuda al pie a mantener su forma natural ya sea en reposo o caminando.** Útil para quien permanece mucho tiempo de pie, o a quien le gusta correr o caminar. Libera y ayuda al pie, dándole una buena transpiración y gracias al tratamiento antibacteriano Sanitized®, obstaculiza la formación de bacterias, causa de malos olores.

Un Amigo para el pie

by Paolo Scettri


Es un dispositivo médico CE
Patente Nº WO 2008/102405



alluce
Valgo®
solution

Alluce Valgo Solution®

Esta idea proviene de muchos años de experiencia adquiridos por los médicos mediante los vendajes tradicionales. Así nace el calcetín **Alluce Valgo Solution®** estudiado y elaborado tecnológicamente entrelazando y mezclando hilados de Algodón-Lycra-Nylon elastificado, respetando así el equilibrio natural de la musculatura y de las articulaciones del pie.

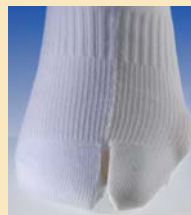

El ángulo de separación del pulgar, es amplio para favorecer una mayor libertad del mismo.

Los huesos de la región del metatarso quedan sujetos, creando un alojamiento confortable a la articulación del pulgar, sede de frecuentes bursitis.



Para las diferentes estaciones

Corto



Medio



Largo



Modelos unisex disponibles en blanco óptico y negro
En las tallas: 34/36 - 37/39 - 40/42 - 43/45